



MicroSwing® 6.0

Installation (Kurzanleitung)

Fragen zur Installation, technischer Support:
+49 (0) 92 31 / 66 08 12

Fragen zu den BIOSWING Therapiesystemen:
+49 (0) 92 34 / 99 22 0

Download der aktuellsten Software-Version:
www.bioswing.de/therapiesysteme



1

Prüfung auf Vollständigkeit

Bitte prüfen Sie den Inhalt des Koffers anhand des Lieferscheins auf Vollständigkeit.

2

Installation der Software

Bitte Legen Sie die Installations-CD ein und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Sollte das Setup nicht automatisch starten, so können Sie die Installation mit der Anwendung „Setup.exe“ im Hauptverzeichnis der CD manuell starten.

3

Anschluss und Installation der Messbox

Schließen Sie die Messbox mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen freien USB Anschluss Ihres Computers an. Windows erkennt die Messbox automatisch als neues USB-Gerät und installiert die entsprechenden Treiber selbständig.

4

Erstmalige Anmeldung

Öffnen Sie die MicroSwing Software und loggen Sie sich beim ersten Öffnen mit dem **Benutzernamen „superuser“** und dem **Passwort „masterkey“** ein. Konfigurieren Sie anschließend Ihre Logindaten unter „Datenbank“ - „DB-Manager“.

5

Fertig!

MicroSwing ist nun einsatzbereit!
Sollten Sie dennoch Fragen zur Installation haben, hilft Ihnen unsere Hotline gerne weiter.