

MicroSwing 5.0

Version 2.5



Kurzanleitung zur Installation

1 Prüfung auf Vollständigkeit

Bitte prüfen Sie den Inhalt des Koffers anhand des Lieferscheins auf Vollständigkeit.



2 Installation der Software

Legen Sie die Installations-CD ein und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch nach Einlegen der CD starten, führen Sie die Datei setup.exe im Ordner „MicroSwing5“ auf der CD aus. Lassen Sie die CD im Laufwerk.

WICHTIG:
Bevor Sie MicroSwing verwenden können, müssen Sie zuerst die Schritte 3-5 „Anschluss der Messbox“, „Installation der Messbox“ und Registrierung“ durchführen!

3 Installation der Messbox


Folgen Sie den Anweisungen Ihres Betriebssystems zur Installation der Messbox.

WICHTIG:
Die Installations-CD muss sich immer noch im Laufwerk befinden!



4 Anschluss der Messbox

Schließen Sie die Messbox mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen freien USB Anschluss Ihres Computers an.

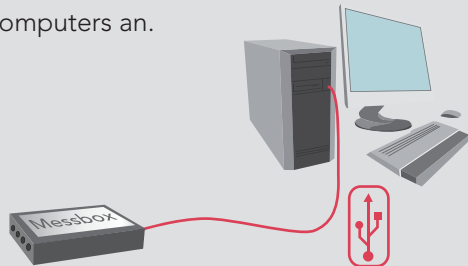

5 Registrierung

Starten Sie MicroSwing indem Sie das entsprechende Symbol auf Ihrem Desktop doppelklicken. Im Menu „Optionen – Modulfreischaltung“ müssen Sie jetzt zunächst alle Felder mit Angaben zu Ihrer Praxis ausfüllen und anschließend den Freischaltcode eingeben. Diesen finden Sie auf der CD-Hülle.

6 Fertig!

Sie haben MicroSwing erfolgreich installiert.

Sollten Sie dennoch Fragen zur Installation haben, hilft Ihnen unsere Hotline gerne weiter.

HOTLINE: +49 (0) 92 31 - 66 08 12

techn. Support für MicroSwing 5.0 – für medizinische Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Firma HAIDER BIOSWING GmbH +49 (0) 9234 - 99 220

K03440-00