



# MicroSwing® 6.0

Installation (Kurzanleitung)

Fragen zur Installation, technischer Support:  
+49 (0) 92 31 / 66 08 12

Fragen zu den BIOSWING Therapiesystemen:  
+49 (0) 92 34 / 99 22 0

Download der aktuellsten Software-Version:  
[www.bioswing.de/therapiesysteme](http://www.bioswing.de/therapiesysteme)



1

## Prüfung auf Vollständigkeit

Bitte prüfen Sie den Inhalt des Koffers anhand des Lieferscheins auf Vollständigkeit.

2

## Installation der Software

Bitte Legen Sie die Installations-CD ein und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Sollte das Setup nicht automatisch starten, so können Sie die Installation mit der Anwendung „Setup.exe“ im Hauptverzeichnis der CD manuell starten.

3

## Anschluss und Installation der Messbox

Schließen Sie die Messbox mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Windows erkennt die Messbox automatisch als neues USB-Gerät und installiert die entsprechenden Treiber selbstständig.

4

## Fertig!

Sie haben MicroSwing erfolgreich installiert.  
Sollten Sie dennoch Fragen zur Installation haben, hilft Ihnen unsere Hotline gerne weiter.

